




Comment lire la feuille de résultats ?

Cette notice présente l'ensemble des tests diagnostiques BioPredictive des principales maladies du foie. Les données utilisées pour les tests ci-dessous sont fictives et n'ont qu'une valeur explicative. Le résultat de votre examen personnel ne figure pas sur ce document, mais sur votre feuille de résultat.

FibroTest

estime les cicatrices du foie (fibrose)

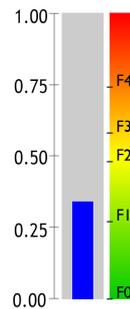


FibroTest est le test qui permet d'estimer la fibrose du foie :

- ▶ F0 : pas de fibrose
- ▶ F1 : fibrose minimale
- ▶ F2 : fibrose modérée
- ▶ F3 : fibrose avancée
- ▶ F4 : fibrose sévère

La fibrose : lésion provoquée par le foie en réaction à l'attaque du virus de l'hépatite, des graisses ou de l'alcool. On compare usuellement la fibrose du foie à une cicatrice qui progresse dans le foie.

SteatoTest

estime la surcharge en graisse (stéatose ou foie gras)

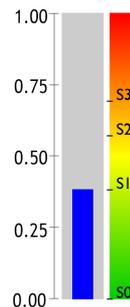


SteatoTest est le test qui permet d'estimer la stéatose :

- ▶ S0 : pas de stéatose (<1%)
- ▶ S1 : stéatose minimale (1-5%)
- ▶ S2 : stéatose importante (6-32%)
- ▶ S3 : stéatose sévère (>32%)

La stéatose : accumulation de graisse dans le foie, provoquée par les anomalies du métabolisme (cholestérol, triglycérides, diabète, surpoids). La stéatose est communément appelée foie gras.

ActiTest

estime l'activité (l'inflammation pour hépatite chronique virale C ou B)

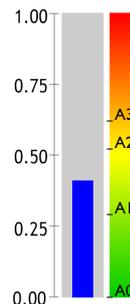


ActiTest est le test qui permet d'estimer l'inflammation :

- ▶ A0 : pas d'activité
- ▶ A1 : activité minimale
- ▶ A2 : activité importante
- ▶ A3 : activité sévère

L'activité : inflammation du foie provoquée par le virus. On compare souvent l'activité à une brûlure.

NashTest

estime l'inflammation (pour les maladies métaboliques : diabète, surpoids, cholestérol, triglycérides)

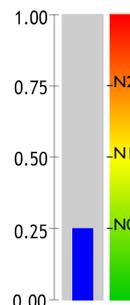


NashTest est le test qui permet d'estimer la NASH :

- ▶ N0 : pas d'inflammation
- ▶ N1 : inflammation probable
- ▶ N2 : inflammation

La NASH : inflammation du foie associée à la stéatose (foie gras). La NASH est la réaction excessive de l'organisme face à l'accumulation de graisse dans le foie. On compare souvent l'inflammation à une brûlure.

AshTest

estime l'inflammation (si trop d'alcool)

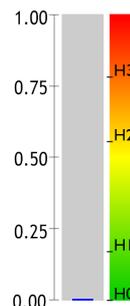

AshTest est le test qui permet d'estimer l'inflammation alcoolique :


- ▶ H0 : pas d'inflammation alcoolique
- ▶ H1 : inflammation alcoolique modérée
- ▶ H2 : inflammation alcoolique importante
- ▶ H3 : inflammation alcoolique sévère

L'activité : inflammation du foie provoquée par l'alcool. On compare souvent l'activité à une brûlure.

Nom du test



FibroTest

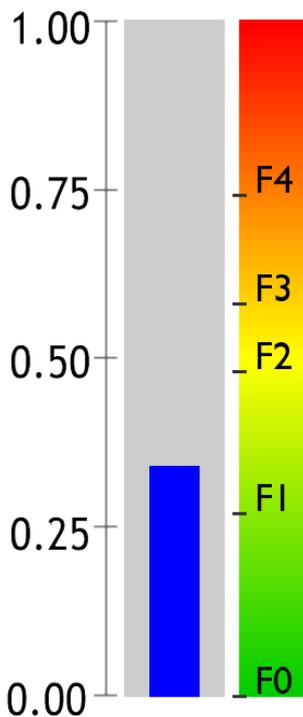

Score: 0.31 (F1)

Le résultat de 0 à 1

Son interprétation (voir ci-contre)

Pour en savoir plus, demandez conseil à votre médecin traitant.

FibroMax™ regroupe l'ensemble de ces tests en un seul examen.

<http://www.biopredictive.com>

BioPredictive S.A.

218 Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS - FRANCE

Tel : +33 1 84 79 23 90

contact@biopredictive.com

