




Как интерпретировать результаты теста?

В данном руководстве по интерпретации представлены тесты компании BioPredictive по диагностике основных заболеваний печени

Использованные в руководстве значения являются условными и носят объяснительный характер. Результат, полученный при подсчете Вашего теста, представлен на отдельной странице.

FibroTest

диагностирует фиброз печени

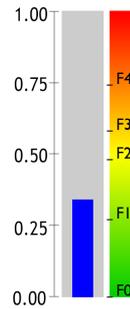


FibroTest определяет степень фиброза по шкале Metavir :

- ▶ F0 : отсутствие фиброза
- ▶ F1 : портальный фиброз без образования септ
- ▶ F2 : портальный фиброз с единичными септами
- ▶ F3 : множественные порто-центральные септы без цирроза
- ▶ F4 : цирроз

Фиброз - замещение соединительной тканью структур печени, возникшее в результате воспалительного процесса в ней.

SteatoTest

диагностирует стеатоз печени

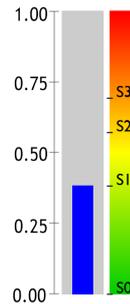


SteatoTest определяет степень стеатоза :

- ▶ S0 : стеатоз отсутствует (<1%)
- ▶ S1 : минимальный стеатоз (1-5%)
- ▶ S2 : умеренный стеатоз (6-32%)
- ▶ S3 : выраженный стеатоз (>32%)

Стеатоз - жировая дистрофия гепацитов

ActiTest

диагностирует активность некрОВОспалительного процесса в печени (хронический гепатит В и С)

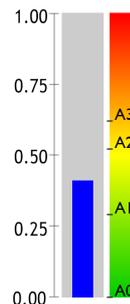


ActiTest диагностирует степень активности воспаления :

- ▶ A0 : активность отсутствует
- ▶ A1 : минимальная активность
- ▶ A2 : умеренная активность
- ▶ A3 : высокая активность

Активность процесса - воспалительные явления в печени, наблюдаемые при хронических гепатитах В и С

NashTest

estime l'inflammation (pour les maladies métaboliques : diabète, surpoids, cholestérol, triglycérides)

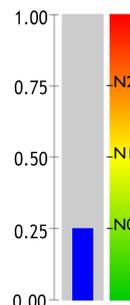


NashTest est le test qui permet d'estimer la NASH :

- ▶ N0 : pas d'inflammation
- ▶ N1 : inflammation probable
- ▶ N2 : inflammation

La NASH : inflammation du foie associée à la stéatose (foie gras). La NASH est la réaction excessive de l'organisme face à l'accumulation de graisse dans le foie. On compare souvent l'inflammation à une brûlure.

AshTest

диагностирует алкогольный стеатогепатит (АСГ) у лиц, злоупотребляющих алкоголем

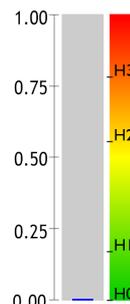

AshTest позволяет определить уровень АСГ :


- ▶ H0 : нет АСГ
- ▶ H1 : минимальный АСГ
- ▶ H2 : умеренный АСГ
- ▶ H3 : выраженный АСГ

Алкогольный стеатогепатит - дегенеративно-воспалительное поражение печени, вызванное злоупотреблением алкоголем

Название теста



FibroTest

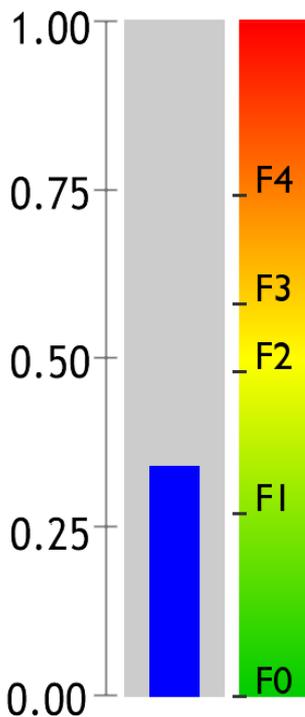

Score: 0.31 (F1)

Результат от 0 до 1

Интерпретация теста (см. описание)

Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом

FibroMax™ включает в себя все вышеперечисленные тесты.

<http://www.biopredictive.com>

BioPredictive S.A.

218 Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS - FRANCE

Tel : +33 1 84 79 23 90

contact@biopredictive.com

