




¿Cómo se lee la hoja de resultados?

Este folleto presenta todas las pruebas diagnósticas de BioPredictive de las principales enfermedades del hígado. Los datos utilizados para las pruebas que se presentan a continuación son ficticios y sólo tienen fines explicativos. El resultado de su propio examen no aparece en este documento sino en su hoja de resultados.



FibroTest

evalúa la cicatrización del hígado (fibrosis)

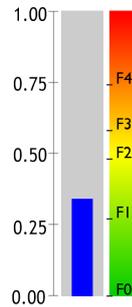

FibroTest es la prueba que evalúa la fibrosis hepática:


- ▶ F0 : no hay fibrosis
- ▶ F1 : fibrosis mínima
- ▶ F2 : fibrosis moderada
- ▶ F3 : fibrosis avanzada
- ▶ F4 : fibrosis grave

Fibrosis: lesión causada por la reacción del hígado al ataque del virus de la hepatitis, la grasa o el alcohol. La fibrosis hepática suele compararse con una cicatriz que se extiende en el hígado.



SteatoTest 2

evalúa la sobrecarga de grasa (esteatosis o hígado graso)

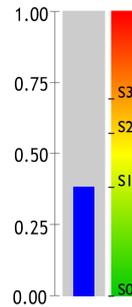

SteatoTest 2 es la prueba que evalúa la esteatosis:


- ▶ S0 : no hay esteatosis (<5%)
- ▶ S1 : esteatosis leve (pero clínicamente significativa) (5-33%)
- ▶ S2S3 : esteatosis moderada a severa (clínicamente significativa) (34-100%)

Esteatosis: acumulación de grasa en el hígado, causada por anomalías metabólicas (colesterol, triglicéridos, diabetes, sobrepeso). La esteatosis es comúnmente llamada hígado graso.



ActiTest

evalúa la actividad (inflamación en la hepatitis viral crónica C o B)

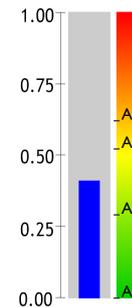

ActiTest es la prueba que evalúa la inflamación:


- ▶ A0 : no hay actividad
- ▶ A1 : actividad mínima
- ▶ A2 : actividad significativa
- ▶ A3 : actividad severa

Actividad: inflamación del hígado causada por el virus. La actividad es a menudo comparada con una quemadura.



NashTest 2

evalúa la inflamación (para enfermedades metabólicas: diabetes, sobrepeso, colesterol, triglicéridos)

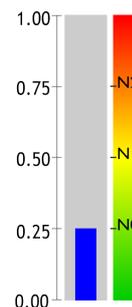

NashTest 2 evalúa el NASH :


- ▶ N0 : no hay NASH
- ▶ N1 : NASH leve
- ▶ N2 : NASH moderado
- ▶ N3 : NASH severo

NASH: inflamación del hígado que se asocia con la esteatosis (hígado graso). La NASH es la reacción exagerada del cuerpo a una acumulación de grasa en el hígado. La inflamación es a menudo comparada con una quemadura



AshTest

evalúa la inflamación (si hay demasiado alcohol)

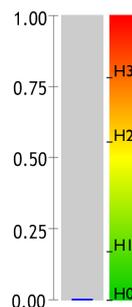


AshTest es la prueba que evalúa la inflamación alcohólica:

- ▶ H0 : no hay inflamación alcohólica
- ▶ H1 : inflamación alcohólica moderada
- ▶ H2 : inflamación alcohólica significativa
- ▶ H3 : inflamación alcohólica severa

Actividad: inflamación del hígado causada por el alcohol. La actividad es a menudo comparada con una quemadura.

Nombre del test

FibroTest

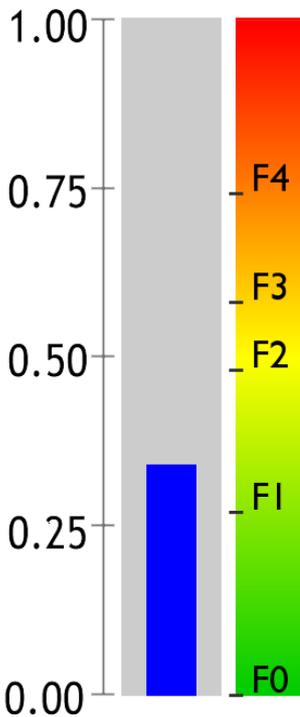

Score: 0.31

(F1)

Resultado de 0 a 1

Su lectura (véase el cuadro de al lado)