




Come leggere il foglio dei risultati ?

Questo avviso presenta l'insieme dei test diagnostici BioPredictive nelle principali malattie del fegato. I dati utilizzati per i test qui sotto sono fittizi e non hanno nessun valore esplicativo. Il risultato del vostro esame personale non figura in questo documento ma sul vostro foglio dei risultati.



FibroTest
valuta la cicatrizzazione del fegato (fibrosi)

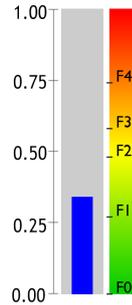


FibroTest è il test che valuta la fibrosi epatica:

- ▶ F0 : nessuna fibrosi
- ▶ F1 : fibrosi minima
- ▶ F2 : fibrosi moderata
- ▶ F3 : fibrosi avanzata
- ▶ F4 : fibrosi severa

La fibrosi: cicatrice provocata dal fegato in reazione all'attacco del virus dell'epatite, ai grassi o all'alcol. Si paragona di solito la fibrosi epatica a una cicatrice che si espande nel fegato.

Nome del test

FibroTest

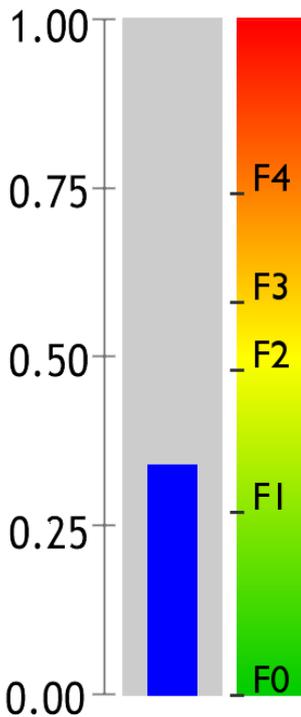

Punteggio: 0.31


(F1)

Il risultato da 0 a 1

Sua interpretazione (vedere al lato)



SteatoTest 2
valuta il sovraccarico di grasso (steatosi o fegato grasso)

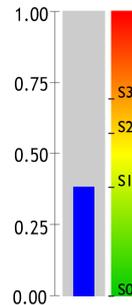


SteatoTest 2 è il test che valuta la steatosi :

- ▶ S0 : nessuna steatosi (<5%)
- ▶ S1 : steatosi lieve (ma clinicamente significativa) (5-33%)
- ▶ S2/S3 : steatosi da moderata a grave (clinicamente significativa) (34-100%)

La Steatosi: accumulo di grasso nel fegato provocato da anomalie del metabolismo (colesterolo, trigliceridi, diabete, sovrappeso). La steatosi è comunemente chiamata fegato grasso.



ActiTest
valuta l'attività (infiammazione per epatite cronica virale C o B)

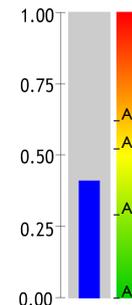


ActiTest è il test che valuta l'infiammazione :

- ▶ A0 : nessuna attività
- ▶ A1 : attività minima
- ▶ A2 : attività significativa
- ▶ A3 : attività grave

L'attività: infiammazione del fegato provocata da virus. Si paragona spesso l'attività a una bruciatura.



NashTest 2
valuta l'infiammazione (per i malati metabolici: diabete, sovrappeso, colesterolo, trigliceridi)

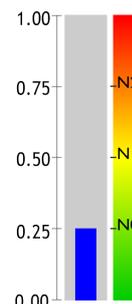


NashTest 2 valuta la NASH :

- ▶ N0 : no NASH
- ▶ N1 : NASH mite
- ▶ N2 : NASH moderata
- ▶ N3 : NASH grave

La Nash : infiammazione del fegato associata alla steatosi (fegato grasso). La Nash è la reazione eccessiva dell'organismo di fronte all'accumulo di grasso nel fegato. Si paragona spesso l'infiammazione a una bruciatura.



AshTest
valuta l'infiammazione (causata da eccesso di alcol)

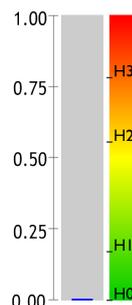

AshTest è il test che valuta l'infiammazione alcolica :

- ▶ H0 : nessuna infiammazione alcolica
- ▶ H1 : infiammazione alcolica moderata
- ▶ H2 : infiammazione alcolica significativa
- ▶ H3 : grave infiammazione alcolica

L'attività: infiammazione del fegato provocata dall'alcol. Si paragona spesso l'attività a una bruciatura.